



SCHULUNGSANLEITUNG

i-Port Advance™


APPLIKATION

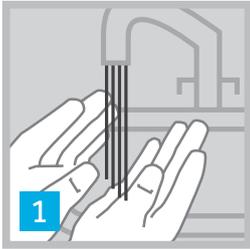


1 Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife.

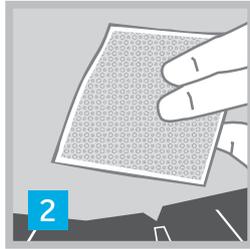


2 Die Haut mit Alkohol oder einem ähnlichen Desinfektionsmittel abwischen. (Vor der Applikation des Produkts die Hautoberfläche vollständig trocknen lassen.)

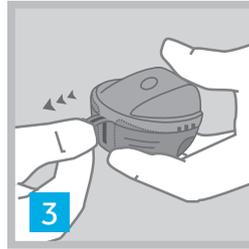

3 Am roten Band ziehen und das Siegel entfernen.

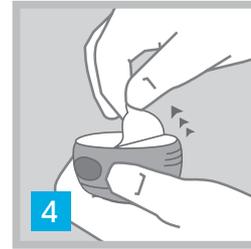

4 Das sterile Papier entfernen.

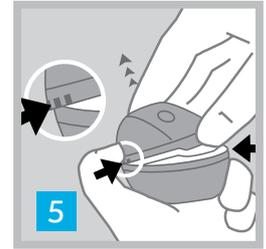


5 Den Inserter festhalten und die Kappe abnehmen.




6 Die Schutzfolie von der Klebeauflage abziehen.



7 Den Nadelschutz drehen und von der Einführnadel abziehen.

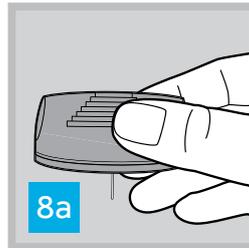


8a Die Einführnadel muss nach unten weisen.

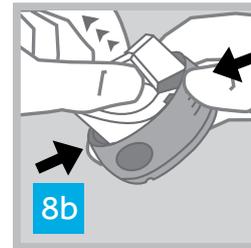

8b Platzieren Sie Ihre Finger auf den geraden Rillen und ziehen Sie mit Ihrer anderen Hand an der Mitte des Inserters, bis dieser in aufrechter Position einrastet.




9 Drücken Sie den Inserter gegen die präparierte Stelle und legen Sie Ihre Finger auf die runden Vertiefungen. Die beiden runden Vertiefungen gleichzeitig drücken, um den Injektionsanschluss einzuführen.

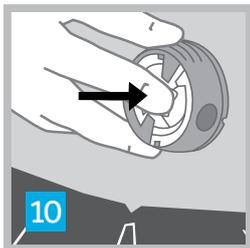

10 Drücken Sie auf die Mitte des Inserters, um den Injektionsanschluss auf Ihrer Haut zu befestigen.



11 Die Mitte des Inserters fassen und den Inserter vorsichtig aus dem Injektionsanschluss herausziehen.

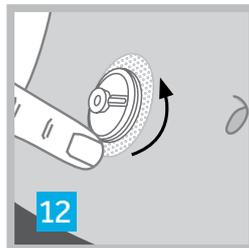

12 Drücken Sie die Klebeauflage fest auf die Haut.



13 Die Kappe wieder aufsetzen und den Inserter entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

HILFREICHE TIPPS

- Beachten Sie vor der Applikation Ihres i-Port Advance™ den Unterschied zwischen den „runden Vertiefungen“ und den „geraden Rillen“ am Inserter.
- Den Inserter nur in der Mitte halten, um ihn vom Injektionsanschluss zu entfernen (siehe Schritt 11)

Medtronic
Further Together

SCHULUNGSANLEITUNG

i-Port Advance™

ANWENDUNG




1 Das Septum vor jeder Anwendung mit destilliertem Wasser reinigen.



2 Das Septum mit einer Injektionsnadel durchstechen.




3 Das Medikament langsam injizieren.

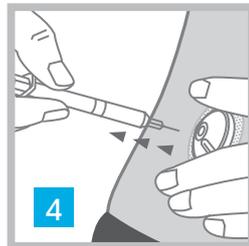


4 Die Injektionsnadel entfernen.

ENTFERNUNG

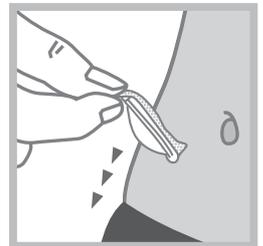


Den Rand der Klebeauflage fassen und von der Haut entfernen.

Lernen Sie i-Port Advance™ kennen

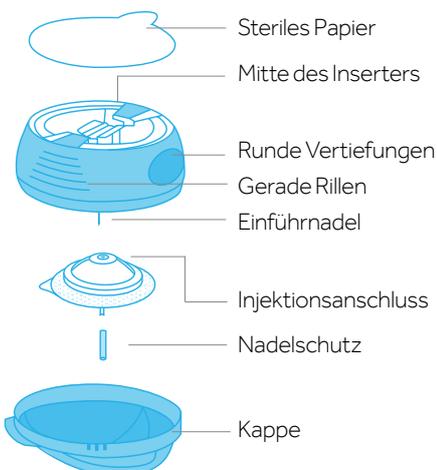

Anwendungsbereiche

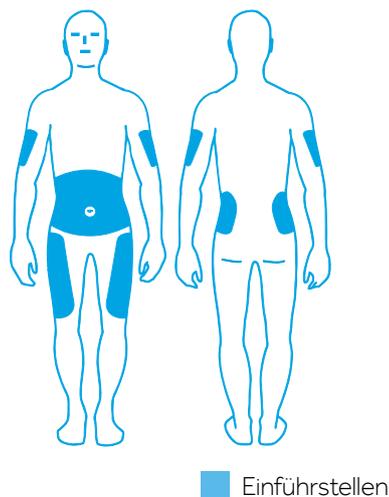

Hierbei handelt es sich um zusätzliche Informationen zu Ihrem Benutzerhandbuch. Eine vollständige Anleitung finden Sie im Benutzerhandbuch.

HILFREICHE TIPPS

- Sie können den i-Port Advance™ sowohl mit Pens als auch mit Spritzen zwischen 5 mm und 8 mm und maximal 28 G verwenden.
- Ein einziger Anschluss kann zum Injizieren von kurz und lang wirkendem Insulin verwendet werden, sofern Sie zwischen den Injektionen 60 Minuten warten und stets das kurz wirkende Insulin zuerst injizieren.
- Nach einer Tragedauer von 72 Stunden oder nach 75 Injektionen – je nachdem, was früher eintritt – entfernen Sie Ihren i-Port Advance™ und bringen Sie den neuen i-Port Advance™ an einer anderen Stelle an.

Eine Liste der Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise und möglichen Nebenwirkungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Medtronic

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee

diabetes.schweiz@medtronic.com
Tel.: +41 (0) 31 868 01 11
Fax.: +41 (0) 31 868 01 98

Hotline: 0800 633 333

www.medtronic-diabetes.ch